

Accufuser^{ABx}® - CTx[®] Gamme Couleur

UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE À L'HYDRATATION

INTÉRÊTS POUR LE MÉDECIN

- Assure une hydratation complète et mesurée
- Garantit que le patient reçoive le traitement nécessaire : contrôle de l'apport hydrique
- Améliore le confort de vie du patient

BÉNÉFICES POUR LES PATIENTS

- Permet d'être autonome, mobile
- Facilite et sécurise les déplacements
- Améliore les conditions de vie à domicile
- Dispositif sans alarme, sans fil, sans bruit, sans encombrement



UNE COULEUR
= UN DÉBIT



Indications :

- Hydratation dans le cadre de chimiothérapie,
- Hydratation des personnes âgées,
- Hydratation et nutrition,
- Hydratation et antibiothérapie...

TABLEAU GAMME HYDRATATION

Durée de perfusion	Couleur coque	Volume remplissage	Volume nominal	Volume maximal	Débit ml/h	Réf	Nbre d'unités par boîte
24 H	Jaune	480 ml	500 ml	550 ml	20	CT0200XL	10
12 H	Bleue	480 ml	500 ml	550 ml	40	AB0400XL	10
10 H	Rose	500 ml	500 ml	550 ml	50	AB0500XL	10

CETTE PLAQUETTE EST CONNECTÉE !

En flashant avec votre smartphone cette page vous accéderez à des informations inédites. Pour profiter de cette expérience, rien de plus simple : il vous suffit juste de télécharger l'application **Onprint**.



- 1 Téléchargez l'application Onprint sur l'Apple Store ou GooglePlay




- 2 Flashez cette page



- 3 Découvrez du contenu supplémentaire sur votre smartphone

Accufuser^{ABx}® - CTx[®] Gamme Couleur

MODE D'EMPLOI

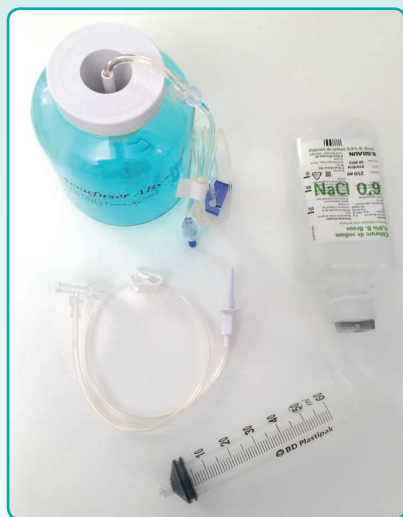

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Accufuser[®] XL
- Poche de soluté
- Tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®])
- Seringue de 50 ml

La tubulure EZ Transfer Set[®]



La tubulure de transfert EZ Transfer Set[®], permet un remplissage facile, rapide et dans des conditions d'asepsie optimales.



1

Retirer le bouchon du site de remplissage de l'Accufuser[®] XL. Connecter la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]).



2

Percuter la poche à l'aide de la tubulure.



3

Visser la seringue de 50 ml sur la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]). Remplir la seringue de soluté et injecter le contenu dans le ballon de l'Accufuser[®] XL. Renouveler l'opération jusqu'au volume souhaité.



4

Le bouchon hydrophobe assure une purge complète sans manipulation. Retirer la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]), revisser le bouchon. L'Accufuser[®] XL est prêt.



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE...
01 81 80 21 22 - info@wymfrance.com



WYM France, 27 rue Joubert 75009 Paris
Tél. : 01.81.80.21.22 - Fax : 01.81.80.21.23
info@wymfrance.com - www.wymfrance.com

WYM
France