

Accufuser+®

GUIDE PATIENT




Qu'est-ce que l'Accufuser+® ?

Votre médecin vous a prescrit votre traitement avec un diffuseur portable **Accufuser+®**.

L'**Accufuser+®** est un dispositif de perfusion appelé diffuseur portable qui vous permet de recevoir votre médicament à domicile en toute sécurité.

L'**Accufuser+®** est léger, portable et ne comporte ni pile, ni branchement électrique.

L'**Accufuser+®** contribue à l'amélioration de votre qualité de vie pendant votre traitement.

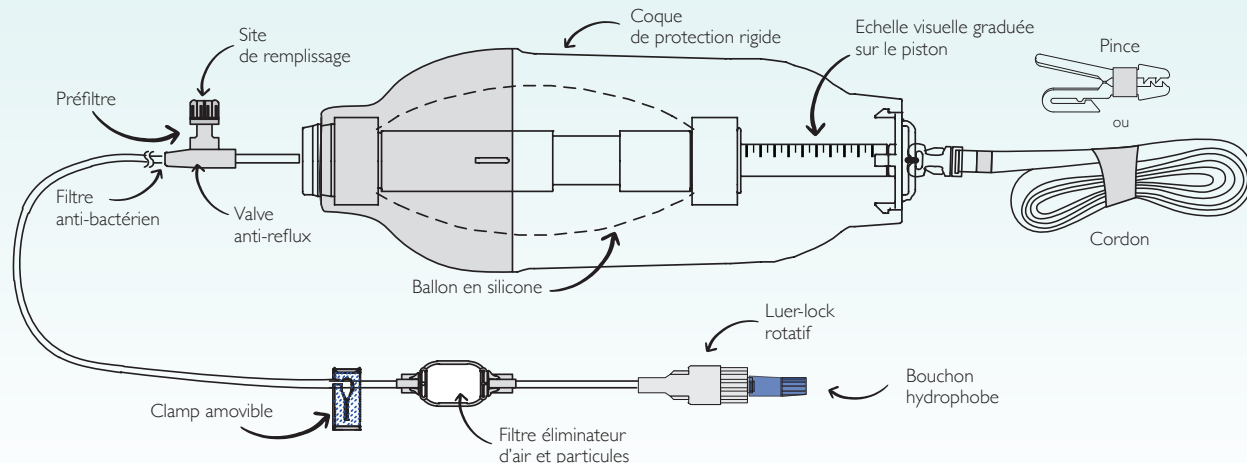

l'Accufuser+® au quotidien

SOUS LA DOUCHE

Nous vous recommandons de ne pas immerger votre **Accufuser+®**. Vous pouvez vous servir de la sacoche pour l'accrocher. Après votre douche, si vous constatez de la buée dans votre diffuseur, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste de condensation.

COMMENT LE CONSERVER ?

A température ambiante : choisissez un endroit sec, frais et propre à l'abri de la lumière du soleil et à distance de sources de chaleur. La durée de votre perfusion est indicative.

Surveillance de la perfusion



INDICATEUR DE PERFUSSION

Vous pouvez suivre l'évolution de votre perfusion à tout moment en regardant la graduation.

Que faire ?

Si vous avez l'impression que votre **Accufuser+®** ne s'écoule pas correctement :

- Vérifiez la graduation.
- En cas de doute, contactez votre équipe soignante.

Si votre **Accufuser+®** présente un problème technique :

- Clampez la tubulure de votre **Accufuser+®**.
- En cas de contact du médicament sur la peau, rincez la partie touchée à l'eau chaude savonneuse.
- Contactez votre équipe soignante.



IL EST RECOMMANDÉ D'ÉVITER :

- de mettre le diffuseur en hauteur ou au sol
- d'aller au soleil ou au froid
- d'obstruer le filtre à air
- de s'approcher d'une source de chaleur
- de l'immerger dans l'eau

Durée de votre perfusion

La durée de votre perfusion est indicative

Votre équipe soignante

Consignes