

# Accufuser XL<sup>®</sup>

Une gamme de diffuseurs portables avec un volume de 500ml pour les perfusions d'hydratation, d'hyperhydratation, d'antibiothérapie, de corticothérapie et pour l'anesthésie loco-régionale.

**UNE COULEUR  
=  
UN DÉBIT**



## Accufuser XL<sup>®</sup>

Vendu par boîte de 10 unités.  
Volume Minimal = 50% du volume nominal.



Durée de perfusion	Référence Accufuser	Débit ml/h	Volume nominal ml	Volume de remplissage ml	Volume maximum ml	Couleur
2h	AB2500XL	250	500	500	550	
5h	AB1000XL	100	500	400 à 550	550	
10h	AB0500XL	50	500	500	550	
12h	AB0400XL	40	500	480	550	
24h	CT0200XL	20	500	480	550	
55h	CT0100XL	10	500	550	550	
3j	CT0080XL	8	500	550	550	
4,5j	CT0050XL	5	500	540	550	

Tubulures EZ Transfer Set<sup>®</sup>

Vendues par boîtes de 20.

# Accufuser XL<sup>®</sup>

MODE D'EMPLOI



## MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Accufuser<sup>®</sup> XL
- Poche de soluté
- Tubulure de transfert (EZ Transfer Set<sup>®</sup>)
- Seringue de 50 ml

## La tubulure EZ Transfer Set<sup>®</sup>



La tubulure de transfert EZ Transfer Set<sup>®</sup>, permet un remplissage facile, rapide et dans des conditions d'asepsie optimales.



1

Retirer le bouchon du site de remplissage de l'Accufuser<sup>®</sup> XL. Connecter la tubulure de transfert (EZ Transfer Set<sup>®</sup>).



2

Percuter la poche à l'aide de la tubulure.



3

Visser la seringue de 50 ml sur la tubulure de transfert (EZ Transfer Set<sup>®</sup>). Remplir la seringue de soluté et injecter le contenu dans le ballon de l'Accufuser<sup>®</sup> XL. Renouveler l'opération jusqu'au volume souhaité.



4

Le bouchon hydrophobe assure une purge complète sans manipulation. Retirer la tubulure de transfert (EZ Transfer Set<sup>®</sup>), revisser le bouchon. L'Accufuser<sup>®</sup> XL est prêt.



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE...

01 81 80 21 22 - [info@wymfrance.com](mailto:info@wymfrance.com)